

Phases	Traitement manuel	Traitement automatique	Matériel de protection	
<pre> graph TD A[Pré désinfection] --> B[Test étanchéité] B --> C[Nettoyage] C --> D[Rinçage intermédiaire] D --> E[Désinfection] E --> F[Rinçage final] F --> G[Séchage] G --> H[Contrôles] H --> I[Stockage] I --> J[Traçabilité] </pre>	<p>Salle d'examen</p> <ul style="list-style-type: none"> – Essuyage de la gaine externe de l'endoscope – Rinçage des canaux air/eau et opérateur – Déconnection de l'endoscope du processeur 		Gants, Surblouse	
	Transport de l'endoscope jusqu'au local de traitement dans un bac fermé Bac de transport désinfecté		Gants	
	Zone sale		Gants, Surblouse Masque+lunettes ou visière	
	<p>Selon les indications du fabricant de l'endoscope. Le testeur sera branché et débranché à l'extérieur du bain de nettoyage</p> <p>Bac contenant solution détergente diluée (selon indications fournisseur) dans eau à T°C < 45°C :</p> <ul style="list-style-type: none"> – Nettoyage surface externe – Brossage des canaux et des valves et orifices – Rinçage des petits canaux 		Gants, Surblouse Masque +lunettes ou visière	
	Solution de nettoyage éliminée après chaque phase de nettoyage Bac de nettoyage désinfecté et rangé après phase de nettoyage			
	<p>Avec eau du robinet rinçage:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Partie externe de l'endoscope (douchette) – Canaux (seringue à usage unique) 		Gants, Surblouse Masque +lunettes ou visière	
	Eau de rinçage éliminée après la phase de rinçage bac utilisé désinfecté avant la phase de rinçage terminal			
	<p>Bac avec sol. désinfectante (acide péracétique ou glutaraldéhyde) à une T°, %, temps de trempage tels que préconisés par le fournisseur du produit. La solution sera changée à un rythme préétabli (selon indications fabricant)</p>	<p>Programmer le laveur-désinfecteur (LD) pour un cycle complet :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Test d'étanchéité 2. Nettoyage 3. Rinçage 4. Désinfection 5. Rinçage 6. Séchage 	Gants, Surblouse Masque + lunettes ou visière	
	<p>Avec eau stérile /distillée Partie externe endoscopes canaux</p>	<p>Produits et qualité eau compatibles avec le LD</p>	Gants, Surblouse Masque + lunettes ou visière	
	Zone propre :			
	<p>Air comprimé médical ou alcool à 70°</p>	<p>Air comprimé médical ou alcool à 70° si non effectué par le LD</p>	Gants à UU propres (colonoscopes) stériles (bronchoscope)	
	<ul style="list-style-type: none"> – Siccité – Absence de salissure – Fonctionnalité de l'endoscope 		Gants à UU propres (colonoscopes) stériles (bronchoscope)	
	A la verticale, dans des armoires propres, entretenues régulièrement			
	<ul style="list-style-type: none"> – Nom et prénom du patient - N° admission – Date et type d'examen endoscopique – N° de l'endoscope – Différentes phases de retraitement et produits utilisés – Date et signature du responsable du traitement – Date du stockage 			